



Nexon Pharma Woda morska izotoniczna Max Spray (30 ml)

Kod EAN: 5903268344242

Producent: Nexon Pharma

Czas wysyłki: 24 Godziny

Marka: Nexon Pharma

Forma podania: Spray

Pojemność: 30ml

Cena

9,75 PLN

Opis produktu

Nexon Pharma Woda morska izotoniczna Max Spray (30 ml)

Wyrób medyczny

- Bez konserwantów – czysty skład
- Codzienna higiena i nawilżenie nosa
- Od 1. miesiąca życia – idealna dla najmłodszych
- Z głębin Oceanu Atlantyckiego – naturalna woda morska



- Wyrób medyczny przeznaczony do stosowania u dorosłych, dzieci i niemowląt od 1. miesiąca życia. Polecany do codziennej higieny nosa, nawilżania błony śluzowej oraz wspomagająco przy infekcjach, alergiach i nieżyty nosa.

Funkcje:

- Wspiera leczenie objawów nieżyty nosa i kataru siennego
- Ułatwia codzienną higienę nosa
- Nawilża wysuszoną błonę śluzową nosa
- Łagodzi podrażnienia śluzówki w czasie infekcji i alergii

Składniki aktywne:

- Woda morska z głębin Oceanu Atlantyckiego (0,028 ml w 1 dozowaniu – 0,1 ml)

Pozostałe składniki:

- Woda demineralizowana (0,072 ml w 1 dozowaniu)

Jak stosować:

- Przed pierwszym użyciem należy kilkakrotnie nacisnąć dozownik, aby wypełnić go płynem. Delikatnie wprowadzić końcówkę aplikatora do nosa i nacisnąć podstawę aplikatora. Po każdym stosowaniu oczyścić końcówkę wodą i mydłem, a następnie opłukać i osuszyć. Niemowlęta powyżej 1 miesiąca życia i dzieci: 1 do 2 dawek sprayu do każdego otworu nosowego 2 do 3 razy dziennie. Dorośli: 1 do 3 dawek sprayu do każdego otworu nosowego 2 do 3 razy dziennie. Produkt może być stosowany codziennie – również u niemowląt od 1. miesiąca życia.

Środki ostrożności:

- Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik. Unikać kontaktu z oczami. W razie wystąpienia dolegliwości – przerwać stosowanie. Nie używać po upływie terminu ważności. Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przechowywanie:

- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25°C. Chronić przed bezpośrednim

działaniem promieni słonecznych.

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Ważne informacje dotyczące wyrobu medycznego:

- Wyrób medyczny - posiada oznakowanie CE.
- Posiada deklarację zgodności UE
- Zawiera instrukcję obsługi w języku polskim
- Zawiera etykietę w języku polskim

Przechowywanie oraz transport wyrobów medycznych są zgodne z warunkami określonymi przez producenta.

Producent i podmiot odpowiedzialny za informacje:

- Glogal Pharma CM S.A. ul. Berezów 49A, 26-130 Suchedniów

Dystrybutor w Polsce i podmiot odpowiedzialny za informacje

- Nexon Pharma Sp. z o.o. Sp.k., ul. Chełmżyńska 249, 04-458 Warszawa